

Безопасность
медицинского
персонала и пациентов

Простота
использования

Удобство пациента




Safety-Lancet

Безопасные
ланцеты



Безопасность и простота использования
в сочетании с максимальным
комфортом пациента

Безопасные ланцеты – новое поколение

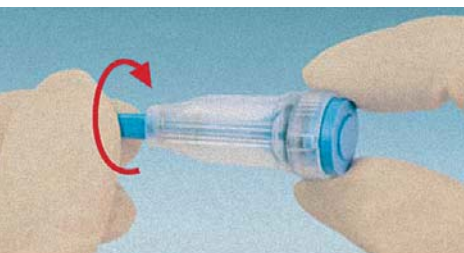

1. Поверните выступающую часть защитного колпачка иглы по часовой стрелке. Не тянуть, только поворачивать!



2. Возьмите ланцет таким образом, как это показано на рисунке. Плотнo прижмите ланцет к обработанному месту прокола и нажмите на круглую спусковую кнопку.



3. Сразу же после прокола кожи поместите ланцет в контейнер для отходов.

Безопасность медицинского персонала и пациентов

- Стерильное лезвие или игла находятся внутри корпуса ланцета, что предотвращает риск повреждения
- Автоматический возврат лезвия/иглы исключает повторное использование ланцета и возможность инфицирования
- Надежный пусковой механизм предотвращает случайный выход лезвия/иглы

Простота использования

- Ланцет готов к использованию
- Удобная форма корпуса ланцета
- Целенаправленный прокол

Удобство пациента

- Гладкое силиконизированное лезвие и трехгранная форма иглы минимизируют болевой эффект
- Возможность выбора глубины прокола для получения необходимого объема крови у детей и взрослых
- Контролируемая глубина прокола исключает риск повреждения кости

Информация для заказа

Кат. №	Описание	Размер	Глубина прокола	Упаковка
85.1015.050	Safety-Lancet Mini	28 G	1.6 мм	200 шт.
85.1016.050	Safety-Lancet Normal	21 G	1.8 мм	200 шт.
85.1017.050	Safety-Lancet Extra	18 G	1.8 мм	200 шт.
85.1018.050	Safety-Lancet Super	Лезвие 1,5 мм	1.6 мм	200 шт.
85.1019.050	Safety-Lancet Neonatal	Лезвие 1,5 мм	1.2 мм	200 шт.

Компания рекомендует использовать ланцеты в комплекте с капиллярными системами взятия крови Microvette®

Как правильно выбрать тип ланцета?

Кат. №	Описание	Размер капли крови	Капиллярная система
85.1015.050	Safety-Lancet Mini	< 50 µl	Капилляр end-to-end
85.1016.050	Safety-Lancet Normal	50 – 100 µl	Microvette® 100
85.1017.050	Safety-Lancet Extra	100 – 200 µl	Microvette® 200
85.1018.050	Safety-Lancet Super	200 – 600 µl	Microvette® 200, 300, 500
85.1019.050	Safety-Lancet Neonatal	До 500 µl	Microvette® 200, 300, 500



ЗАО «Фирма ГАЛЕН»
Россия, 109004, Москва
ул. Таганская, д. 26, стр. 1
Тел.: (495) 105 56 75 Факс: (495) 674 43 88
e-mail: galen@galen.ru
www.galen.ru